

## Hydrokolloidwundauflagen

aktivmed Hydrokolloidwundauflagen sind ideal zur Behandlung leicht bis mäßig exsudierender Wunden.

aktivmed bietet eine Auswahl von Hydrokolloidwundauflagen, die die Heilung feuchter Wunden unterstützen. Diese sind in unterschiedlichen Größen erhältlich.


aktivmed Hydrokolloidwundauflagen bestehen aus einer dünnen Hydrokolloidlage, beschichtet mit einer äußerst atmungsaktiven Folie.

### Produktleistung

aktivmed Hydrokolloidwundauflagen absorbieren Exsudat in die Hydrokolloidmatrix und transpirieren die Wundflüssigkeit durch die atmungsaktive Außenhaut. Diese Kombination verbessert die Flüssigkeitsaufnahmefähigkeit der Wundauflage und reguliert gleichzeitig den Feuchtigkeitsgehalt der Wunde.

### Feuchtigkeitstransport

#### Absorption und Abdampftrate

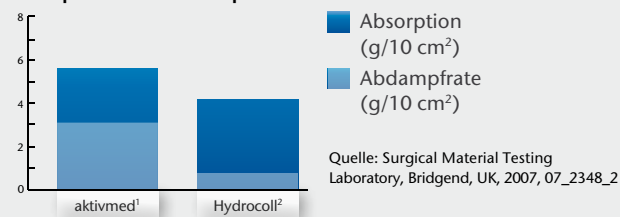


- aktivmed Hydrokolloidwundauflage 10 x 10 cm, PZN 08775775
- Hydrocoll Wundverband 10 x 10 cm, Hartmann, PZN 04419865

### Indikationen


aktivmed Hydrokolloidwundauflagen können bei leicht bis mäßig exsudierenden, chronischen und akuten Wunden verwendet werden, wie z. B.

- Druckgeschwüren
- venösen Beingeschwüren
- diabetischem Fußulcus
- oberflächlichen und leichten Verbrennungen
- postoperativen chirurgischen Wunden
- Schürfwunden
- Schnittwunden
- tiefen Wunden
- Hohlraumwunden

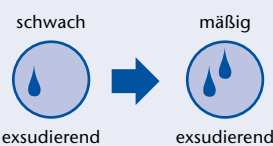

### Anwenderstudie

Frau H., 92 Jahre alt, hat eine komplexe Krankengeschichte mit einer ischämischen Herzerkrankung, Hypertonie, einem Diabetes Typ-2 und einer Arthrose. Die Patientin wurde mit einem venösen Ulcus vorgestellt, den sie bereits seit einem Monat hatte. Dieser befand sich auf dem vorderen Unterschenkel ihres rechten Beines.

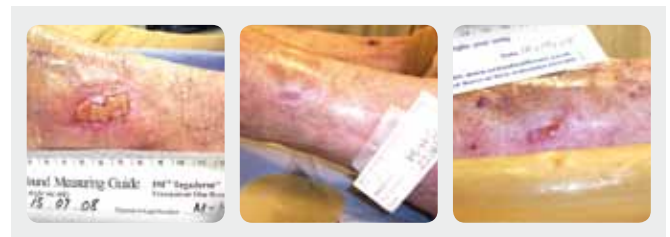

#### Woche 1:

Bei der Eingangsuntersuchung zeigte die Wunde 90 % nicht lebensfähiges Gewebe, 5 % Granulationsgewebe und 5 % geheiltes und reepithelisiertes Gewebe.

#### Woche 3:

Nach 3 Wochen Behandlung mit Hydrokolloidwundauflagen war die Wunde zu 80 % geheilt (bzw. reepithelisiert) und bestand zu 20 % aus nicht-epithelisierendem Granulationsgewebe.

#### Woche 5:

Während der verbleibenden 2 Wochen wurde die Wunde vollkommen reepithelisiert.



aktivmed Hydrokolloidwundauflage erhalten Sie direkt bei aktivmed oder in Ihrer Apotheke.

Größe	Art.-Nr.	Inhalt	PZN	AEP
5 x 7,5 cm	21914	10 Stück	08775315	34,95 €
10 x 10 cm	21915	10 Stück	08775775	39,95 €